

FIMET

Kaapistoimu



Itsenäinen imuratkaisu tehokkaaseen ja

Itsenäinen Kaapistoimu on imuratkaisu, joka tekee päivittäisestä työstäsi sujuvampaa ja hygienisempää.


Asennettuna kaappiin hoitotuolin taakse, se tarjoaa hiljaisen ja tasaisen imutehon, ergonomisen käytettävyyden sekä vaivattoman huollon.



Ergonomiset ominaisuudet, jotka tekevät työskentelystäsi kevyempää ja tarkempaa

Teleskooppisen imuvaan varren ansiosta imupää liikkuu luonnollisesti mukana - tarjoten laajan ulottuvuuden, kevyen käsiteltävyyden ja tarkan sijoittelun.

Se on suunniteltu helpottamaan sekä yksi- että kaksikätistä työskentelyä, pitäen kaiken lähettävilläsi, näin vähentäen ranteiden kuormitusta.

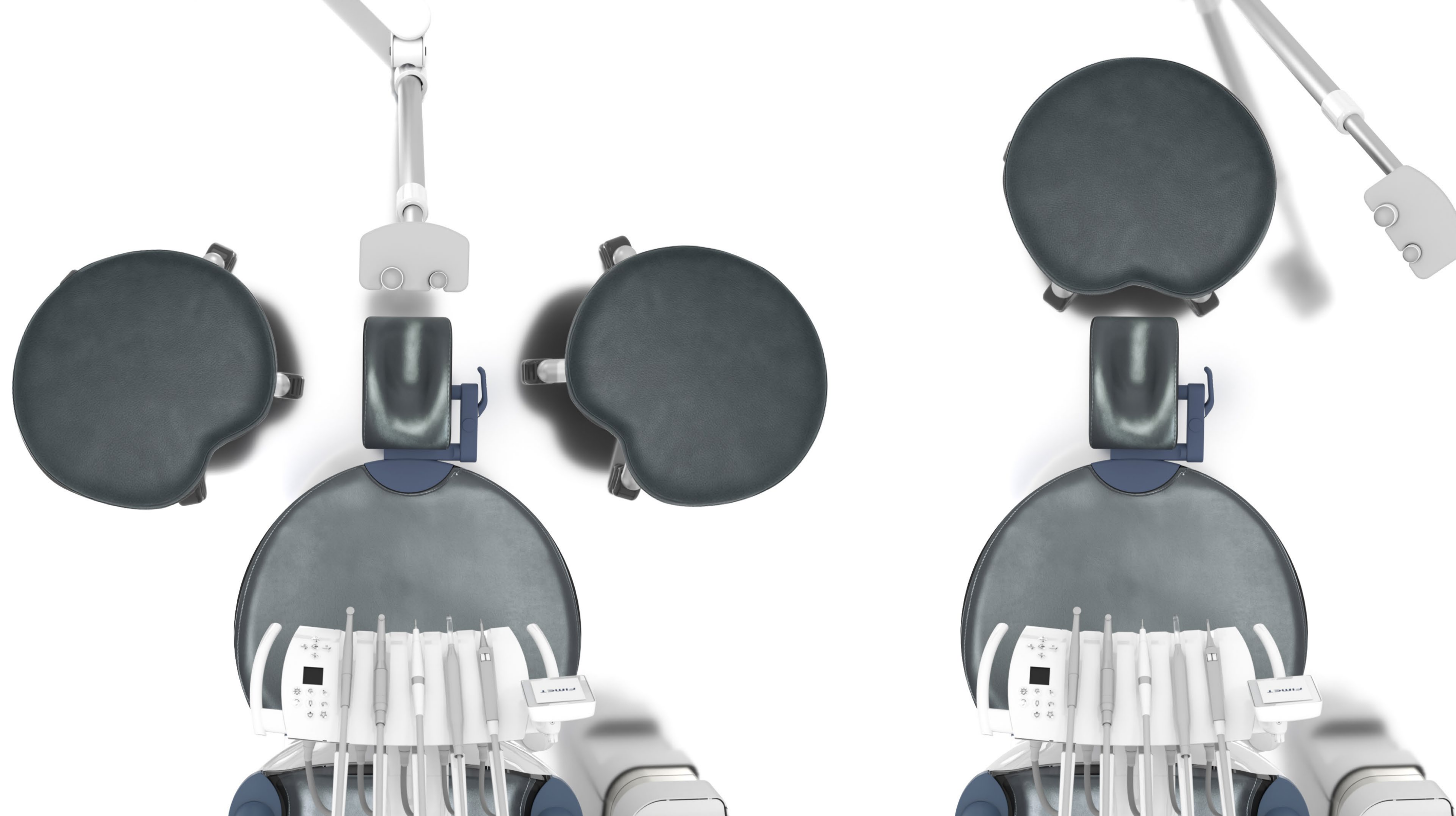

Täysin itsenäinen laitteisto

Fimet Itsenäinen kaapistoimu toimii täysin itsenäisesti – siinä imun ohjaus, ja valinnaisesti amalgaamierottelu, sekä imuletkujen ja -järjestelmän desinfiointi, jotka takaavat tasaisen ja luotettavan imutehon

Laite tukee saumatonta ohjausintegraatiota kaikkien hoitoyksiköiden kanssa.

Helppo asentaa, vielä helpompi huoltaa

Fimet Kaapistoimu toimitetaan käyttövalmiina kokonaisuutena, sisältäen kaikki tarvittavat liitännät – sähkönsyötön, viemäroinnin ja keskusimuyhteyden.

Kaikki säännöllistä huoltoa vaativat komponentit löytyvät kaapin etupuolelta, mikä tekee huollosta nopeaa ja yksinkertaista. Laitteen voi helposti nostaa pois kaapista huoltoa varten.

Ratkaisu on suunniteltu minimoimaan käyttökatkot ja maksimoimaan tehokas työaika – jotta klinikkasi pysyy tehokkaana.

Ready-to-use product package

Electrical network
Central suction system
Drain

Automatic suction disinfection

Water connection



Neljä konfiguraatiota erilaisia tarpeita varten

Wetline / Wetline + desinfiointi / Amalgaamierottelija / Amalgaamierottelija + desinfiointi

Konfiguraatiot amalgaamierottimella

MST1 varmistaa jopa 98,6 %:n erotustehokkuuden. Lisäksi sentrifugi puhdistaa itse itsensä jokaisen pysähdyksen jälkeen. Tämä takaa korkean käyntitasaisuuden ja toimintavarmuuden.

Kun hammaslääkärit poistavat tai asettavat amalgaamipaikkoja, jätevesiin vapautuu pieniä hiukkasia, jotka sisältävät elohopeaa, hopeaa, tinaa ja kuparia. Amalgaamierotin kerää nämä hiukkaset taltteen ennen kuin vesi poistuu Fimet kaapistosta tai hoitoyksiköstä.



Konfiguraatiot desinfioinnilla

Hygienijärjestelmä tarjoaa automaattisen ja jatkuvan koko imujärjestelmän puhdistuksen, desinfioinnin, vaahdoneston ja hajunpoiston hoidon aikana

Imulinjojen ja -järjestelmän desinfiointiratkaisu on integroitu hammaslääkärin imujärjestelmään siten, että sisäiset letkut ja liitännät käsitellään säännöllisesti desinfiointiaineella.

Vaihdettava desinfiointinestepussi kestää jopa 2-3 kuukautta ja varmistaa tasaisen hygieniatason sekä turvallisen toiminnan – joka päivä, jokaiselle potilaalle.



Tehokkuutta, hygieniaa ja mukavuutta arvostaville klinikoille


Fimet Itsenäinen kaapistoimu tarjoaa luotettavan käyttökokemuksen – kaikki suunniteltu tekemään päivittäisestä työstäsi puhtaampaa, hiljaisempaa ja helpompaa.

Se on älykkäämpi tapa hallita imua nykyaikaisessa hammaslääkärin vastaanotossa.



Suomalaista suunnittelua, johon voit luottaa

Fimet Cabinet Suction on suunniteltu ja valmistettu Suomessa, ja se täyttää MDR-luokan I ja siihen liittyvät standardit.




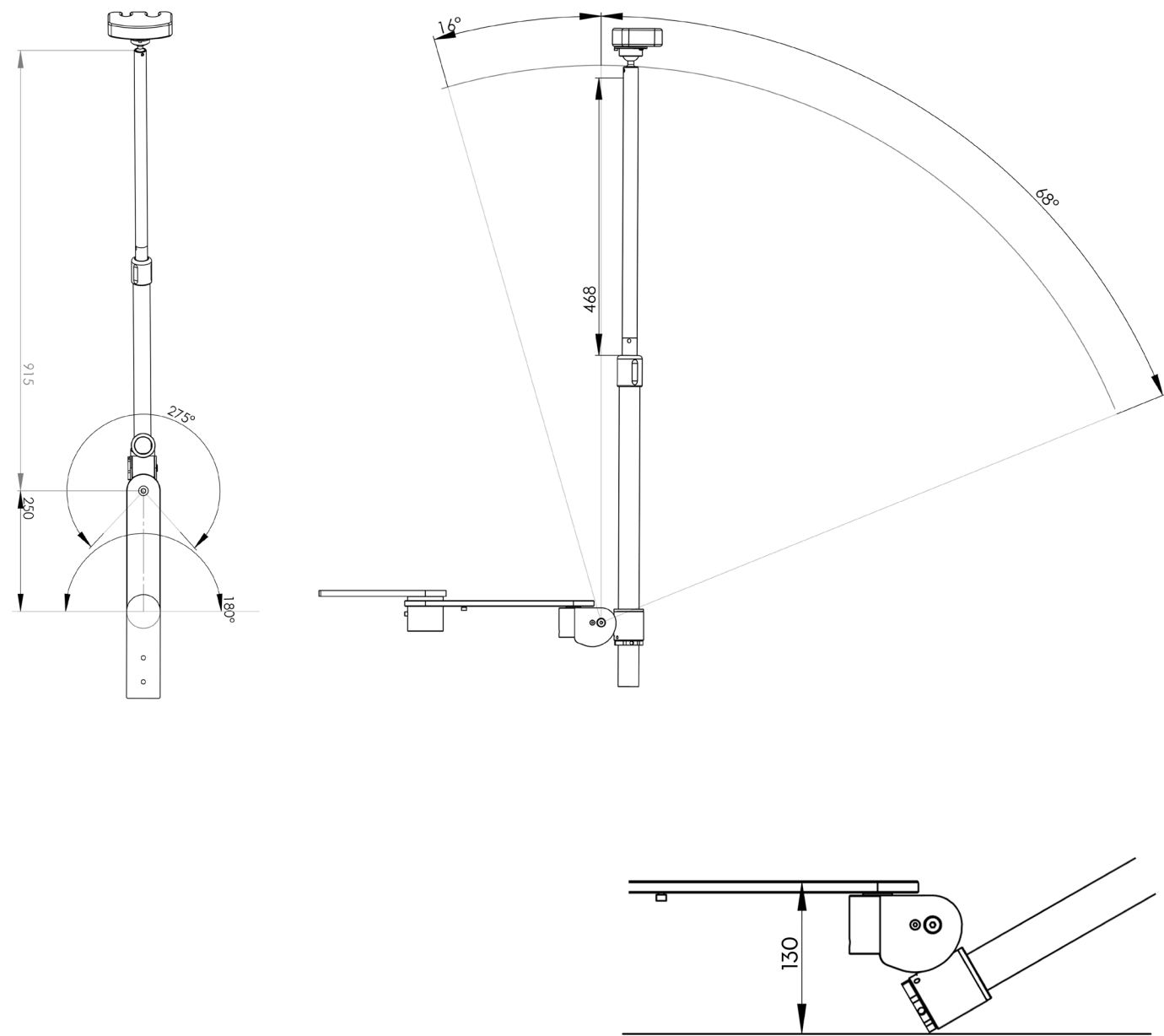

Tekniset kuvat

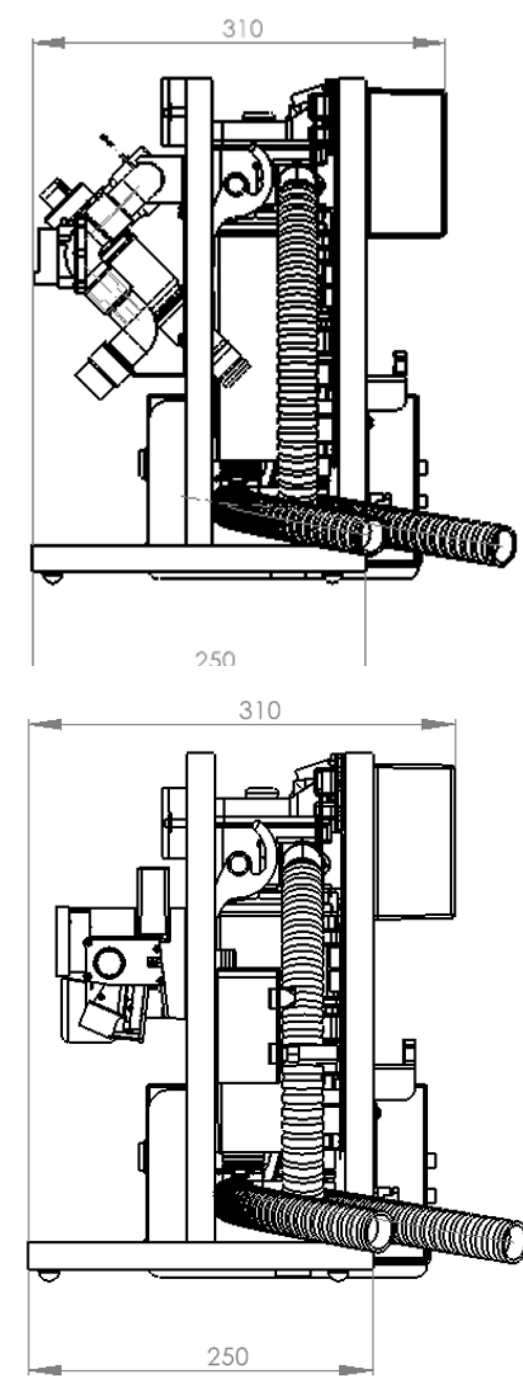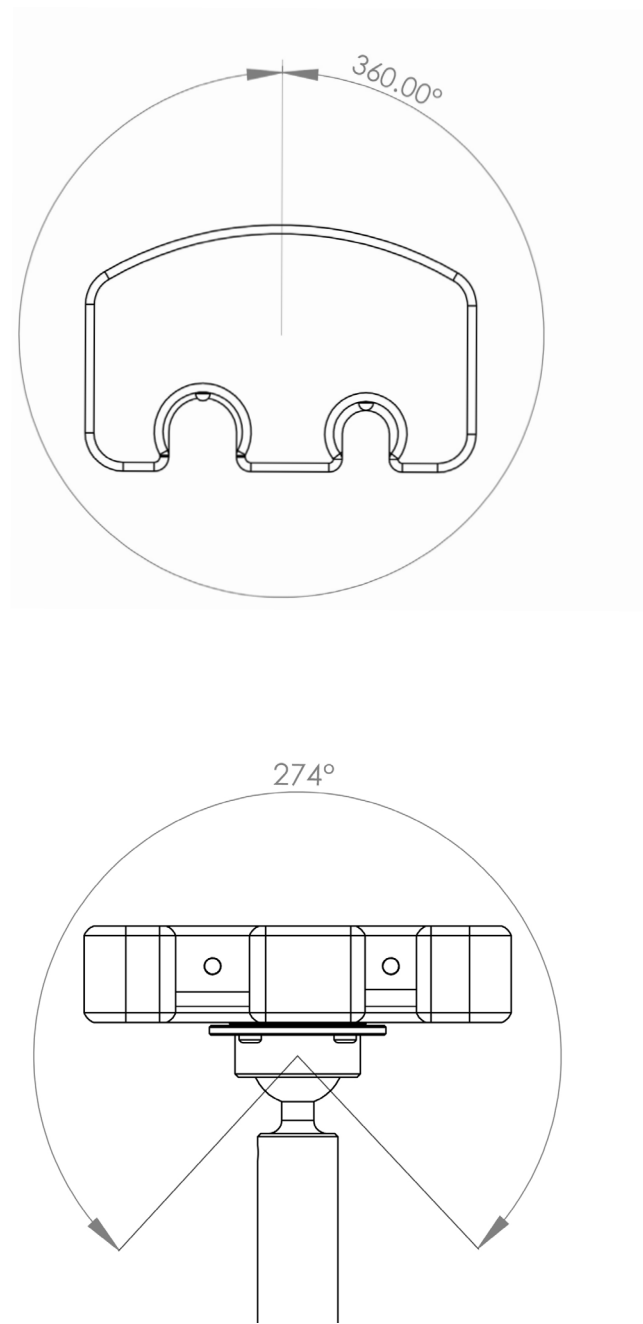

Tekniset kuvat

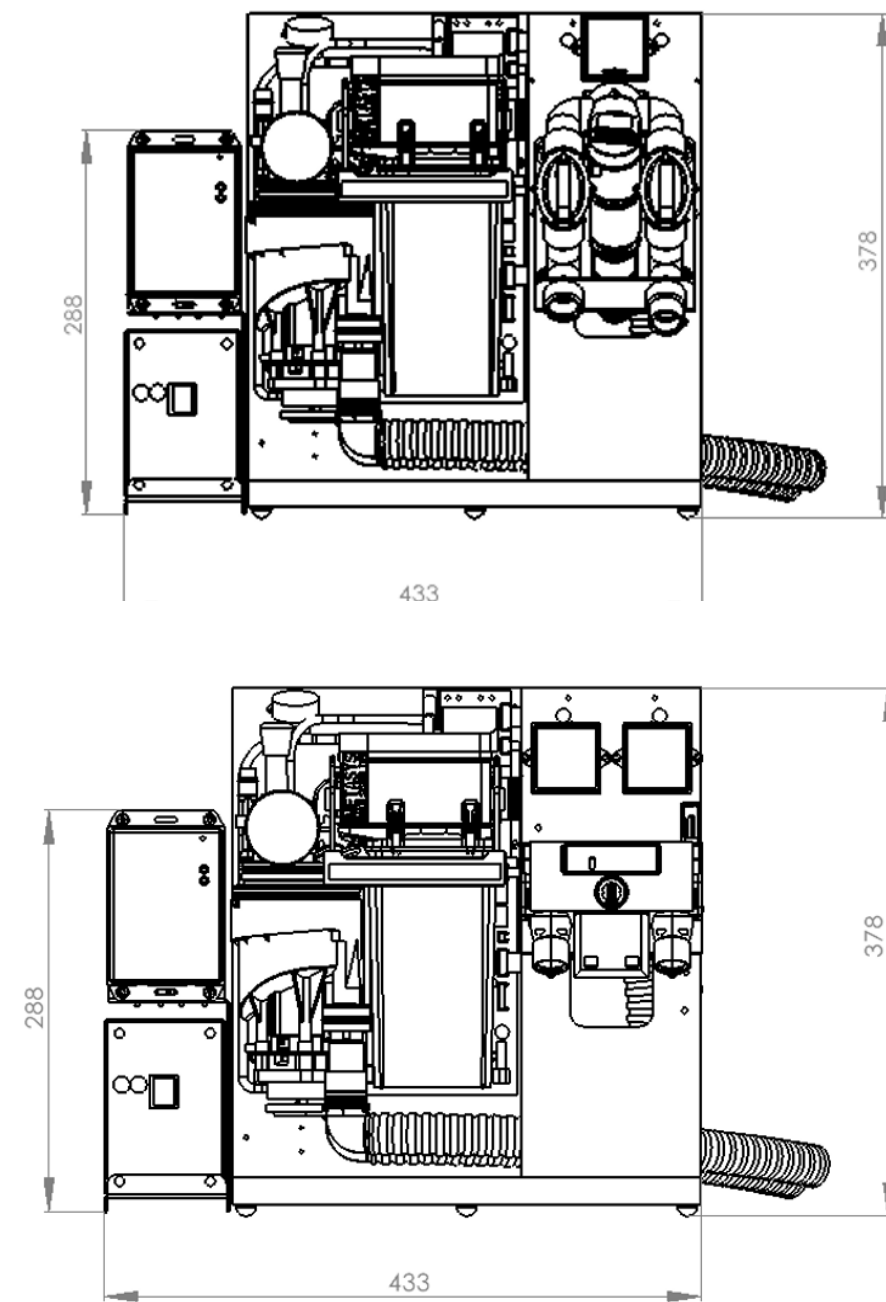

Kaapistoimu

Fimet Itsenäinen kaapistoimu tarjoaa luotettavan käyttökokemuksen – kaikki suunniteltu tekemään päivittäisestä työstäsi puhtaampaa, hiljaisempaa ja helpompaa. Se on älykkäämpi tapa hallita imua nykyaikaisessa hammaslääkärin vastaanotossa.

Tarkempia tietoja saat osoitteesta www.fimet.fi tai valtuutetulta jälleenmyyjältä

FIMET

Fimet Oy

Teollisuustie 6

FI-07230 Askola

Finland

+358 19 521 6600

fimet@fimet.fi

www.fimet.fi